

astron®

DURAClean²

Spezialreiniger



für

CLEARsplint®

Premium-Aufbisssschienen

Gebrauchsinformation DURAClean²

Anwendungsgebiet:

Das DURAClean² Reinigungspulver wurde speziell für die Pflege und Reinigung von flexiblen Aufbisssschienen wie z.B. astron CLEARsplint® entwickelt.

Dosierung und Anwendung:

DURAClean² Reinigungsbehälter oder Glas zur Hälfte mit warmem Leitungswasser füllen.

1 Messbecher oder 1 gestrichenen Teelöffel DURAClean² Pulver hinzugeben und unter Rühren vollständig auflösen.

Aufbisssschiene in den Reinigungsbehälter mit der angerührten Lösung einlegen (die Schiene muss vollständig bedeckt sein) und mindestens 15-20 Minuten einwirken lassen.

Nach der Reinigung die Aufbisssschiene aus der Lösung nehmen und gründlich unter fließendem Leitungswasser mit der DURAClean² Reinigungsbürste abbürsten.

Reinigungsbehälter oder verwendetes Glas entleeren und gründlich ausspülen. Alle Gegenstände, die mit dem Reinigungspulver oder der Lösung in Berührung gekommen sind, müssen ebenfalls gründlich unter fließendem Wasser gereinigt werden.

Aufbisssschiene nach der Reinigung trocknen und in den trockenen DURAClean² Reinigungsbehälter, der auch als Aufbewahrungsbox verwendet werden kann, legen oder an einem anderen trockenen Ort aufbewahren.

ACHTUNG! Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- Die Dose ist mit einer Kindersicherung versehen.
- Zum Öffnen **Drückt auf Dose drücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen.**
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren!
- Nach Gebrauch DURAClean² Reinigungspulver sorgfältig verschließen.
- Nicht im Mund anwenden!
- Pulver oder Lösung nicht schlucken oder damit gurgeln!
- Bei Augenkontakt Augen gründlich mit Wasser ausspülen.

Das Produkt wurde für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt und muss gemäß Gebrauchsinformation angewendet werden. Für Schäden, die sich aus anderweitiger Verwendung oder nicht sachgemäßer Anwendung ergeben, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Darüber hinaus ist der Anwender verpflichtet das Produkt eigenverantwortlich, vor dessen Einsatz, auf Eignung und Verwendungsmöglichkeit für die vorgesehenen Zwecke zu prüfen - insbesondere, wenn diese Zwecke nicht in der Gebrauchsinformation aufgeführt sind.

Stand der Information: 14. Januar 2014

Sparsam im Gebrauch – reicht für 48 Anwendungen.

Set Reiniger (170 g) mit Behälter und Bürste REF 26170S

Reinigungsmittel - Dose mit 170 g REF 26171

Reinigungsbürste REF 26172

Reinigungsbehälter REF 26173

KENTZLER
KASCHNER
DENTAL

KENTZLER-KASCHNER DENTAL GmbH

Mühlgraben 36

73479 Ellwangen/Jagst

Telefon: +49 (7961) 90 73-0

Fax: +49 (7961) - 5 20 31

info@kkd-topdent.de

www.kkd-topdent.de



astron[®] DURAClean²

Aufgrund der hohen Abrasivität von Zahncremes ergibt sich bei längerem Gebrauch der negative Effekt der optischen Beeinträchtigung (Grauschleier) Ihrer hochästhetischen klaren CLEARsplint[®] Premium-Aufbisschiene!


Aggressive Reinigungsmittel, wie z.B. Prothesenreiniger dürfen bei CLEARsplint[®] Premium-Aufbisschiene prinzipiell nicht verwendet werden!

Reinigung mit Zahnbürste und Zahnpasta



Bereits nach kurzer Zeit ist die Oberfläche zerkratzt und matt.

Reinigung mit DURAClean²

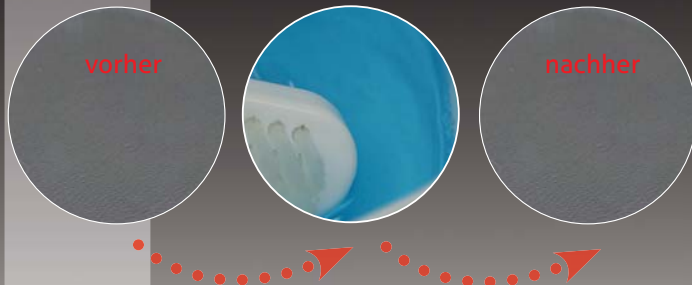

Auch nach mehrmaliger regelmäßiger Reinigung bleibt die Oberfläche unbeschädigt und klar

