


POLITURLEITFADEN

LITHIUM-DISILIKAT ZIRKONOXID

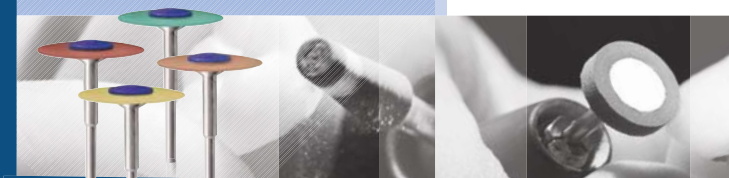

KENTZLER-KASCHNER DENTAL GMBH
Geschäftsbereich TOPDENT®
Mühlgraben 56
D-75479 Ettlingen (Jagst), Germany
Fon: +49 7961 90 73-0
Fax: +49 7961 5 20 31
E-Mail: info@kkd-topdent.de

www.kkd-topdent.de



TOPDENT DIA-BLUE SC | Lithium-Disilikat

Körnung: rot = mittel
gelb = fein

Packung: Je 3 Stück

Empf. RPM:
8.000 – 12.000 min

Art.-Bez.:	Spitzen	Kelche	Linien	Spitzen	Kelche	Linien
REF:	23340	23341	23342	23345	23346	23347
Maße (mm):	4 x 10	6 x 7,5	10 x 2,5	4 x 10	6 x 7,5	10 x 2,5



Körnung: rot = mittel
gelb = fein

Packung: Je 1 Stück Linse
Je 3 Stück Spitzen
Je 3 Stück Räder

Empf. RPM:
8.000 – 12.000 min

Art.-Bez.:	Linse	Spitzen	Räder	Linse	Spitzen	Räder
REF:	22484	22483	22482	22489	22488	22487
Maße (mm):	20 x 1	4 x 13	11 x 2	20 x 1	4 x 13	11 x 2



TOPDENT DIA-BLUE O-CERA | Zirkonoxid

Körnung: grün = mittel
orange = fein

Packung: Je 3 Stück

Empf. RPM:
8.000 – 12.000 min

Art.-Bez.:	Spitzen	Kelche	Linien	Spitzen	Kelche	Linien
REF:	23327	23328	23329	23333	23334	23335
Maße (mm):	4 x 10	6 x 7,5	10 x 2,5	4 x 10	6 x 7,5	10 x 2,5



Körnung: grün = mittel
orange = fein


Packung: Je 1 Stück Linse
Je 3 Stück Spitzen
Je 3 Stück Räder

Empf. RPM:
8000 – 12.000 min

Art.-Bez.:	Linse	Spitzen	Räder	Linse	Spitzen	Räder
REF:	22471	22470	22472	22476	22475	22477
Maße (mm):	20 x 1	4 x 13	11 x 2	20 x 1	4 x 13	11 x 2



TOPDENT DIA-BLUE SC

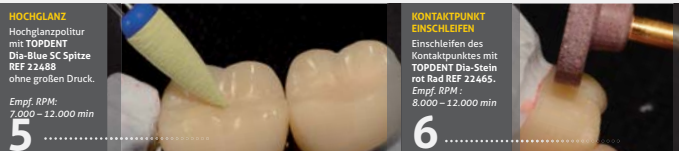

TIP Zum Polieren in der Praxis nach dem Einschleifen empfehlen wir das Set 233505.

Lithium-Disilikat



Lithium-Disilikat ist eine hochfeste Glaskeramik, die sowohl in Form präfabrizierter, massiv gegossener CAD/CAM-Blöcke als auch als Presskeramik erhältlich ist. Hierdurch ergibt sich ein sehr breites Indikationsfeld. Die sehr gute Verarbeitbarkeit ist der Vorteil des Materials.

Grundsätzlich ist es möglich, das Material nach dem Bearbeiten mit Metallinstrumenten auf Hochglanz zu polieren und somit in wenigen Arbeitsschritten fertig zu stellen. Für diese Anwendung bietet Kentzler-Kaschner Dental GmbH

TOPDENT Dia-Blue SC SET HP REF 224405




Zirkonoxid



Versorgungen hat. Mit dem TOPDENT DIA-BLUE O-CERA Poliersystem bietet Kentzler-Kaschner Dental GmbH eine Bearbeitungslösung an, die das Material nicht nur auf Hochglanz bringt, sondern durch die Politur nachgewiesenermaßen auch die physikalische Stabilität erhöht. Auf Hochglanz polierte stabile Zirkonoxidoberflächen sind das erreichbare Ziel.


TOPDENT Dia-Blue O-Cera SET HP REF 224805

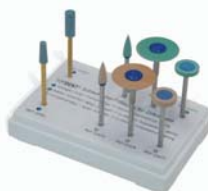

Zirkonoxid wird als Material immer populärer, und viele Hersteller der Dentalindustrie bieten Materialien für vollanatomische Zirkonoxid-restaurationen an. Die richtige Bearbeitung von Zirkonoxid ist auf Grund der Gefahr von Mikrorissbildung ein lange Zeit kontrovers diskutiertes Thema. Studien belegen inzwischen, dass die Bearbeitung mit den passenden Instrumenten nicht nur möglich ist, sondern auch einen positiven Einfluss auf die Langzeitstabilität der



TOPDENT DIA-STEIN GRÜN

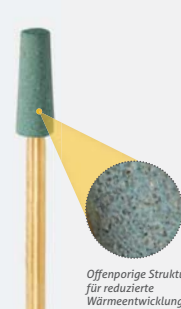

TOPDENT DIA-STEIN GRÜN - REF 22462

TOPDENT DIA-STEIN stellen eine neuartige Schleifergeneration dar, die eine hohe Abragrate erzielt und gleichzeitig die Wärmeabfuhr aus dem bearbeiteten Material ermöglicht.

Von großer Bedeutung ist die versuchte Temperatur im bearbeiteten Werkstück, da diese ein späteres Versagen der Keramikversorgung zur Folge haben könnte. Speziell die thermische Belastung im Werkstück ist durch die Bearbeitung mit dem synthetisch gebundenen TopDent Dia-Steinen im Vergleich zu einem keramisch gebundenen Schleifsystem deutlich geringer.

TOPDENT DIA-BLUE O-CERA



TIP Zum Polieren in der Praxis nach dem Einschleifen empfehlen wir das Set 233205.